

¿Qué es tampsec® ?

Tampsec es un tampón vaginal que evita las pérdidas de orina ocasionadas por la incontinencia urinaria de esfuerzo.

Se introduce dentro de la vagina elevando la pared vaginal, proporcionando a la uretra el soporte necesario para evitar la pérdida de orina.

LOS BENEFICIOS DE TAMPSEC:

Sin Tampsec





Con Tampsec



- Tampsec evita las pérdidas de orina y todas sus consecuencias como la irritación, escaras, mal olor causado por el contacto de la orina con la piel.
- Es higiénico ya que se coloca dentro de la vagina y no está en contacto con la orina, puede llevarse hasta 12 horas seguidas y no es necesario sacárselo para orinar.
- Es cómodo de llevar ya que el material es adaptable a la anatomía de cada mujer.
- Pueden ingerir líquidos, hacer deporte, toser, reír, sin pérdida de orina.
- No estarán condicionadas para vestir, podrán llevar pantalones y vestidos ajustados y dejarán de llevar bolsos grandes para llevar toallitas, compresas, mudas...
- Vuelven a recuperar la autoestima, la seguridad, la confianza, la tranquilidad...

Tampsec está disponible en 3 tallas (Mini, Regular y Extra) – En el reverso de la página puede consultar cuál es su talla.

Modo de uso de **tampsec** y cuál es tu talla

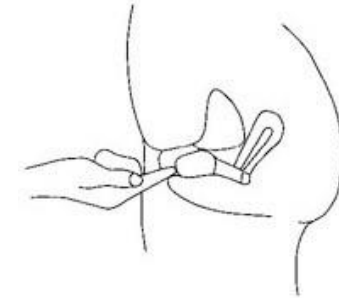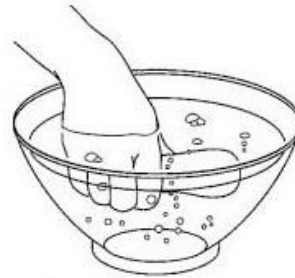

Antes de usar **Tampsec** recuerde lavarse las manos cuidadosamente.

Saque el tampón de la bolsa. Empapelo en agua tibia durante aproximadamente 1 minuto. Cuando el tampón se vuelva suave escúrralo con cuidado.

Ahora ya puede insertar **Tampsec** en la vagina del mismo modo que un tampón para la menstruación.

Empieza siempre usando la talla REGULAR. Es la ideal para el 85% de todas las mujeres.

Si después de usar la talla regular aún pierdes unas gotas tu talla será la EXTRA.

Si usando la talla REGULAR evitas las pérdidas pero notas la presión del tampón, tu talla será la MINI.

MINI
REGULAR
EXTRA

Para facilitar la **introducción** del tampón, puede utilizar una crema con estrógenos que ayudará a mantener la flora y las secreciones vaginales.

Para facilitar la **extracción** del tampón, si la vagina está seca, es conveniente inyectar agua tibia mediante una jeringa sin aguja para humedecer el tampón antes de su extracción.

